

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/bactacid-af-wipes-200-szt-alkoholowe-chusteczki-do-mycia-i-dezynfekcji-wyrobow-medycznych-p-1852.html>



Bactacid AF Wipes 200 szt alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

Cena	45,00 zł
Producent	Chemi-Pharm AS

Opis produktu

Alkoholowe chusteczki Bactacid AF Wipes 200 sztuk

CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKЦИИ NA BAZIE ALKOHOLU DO WYROBÓW MEDYCZNYCH

- gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji nasączone Bactacid AF
- Nie zawiera aldehydów, barwników i substancji zapachowych
- szybka dezynfekcja o szerokim działaniu biobójczym
- skuteczny przeciwko wirusom Noro, Adeno i Polio
- bez pozostałości

Chusteczki Bactacid AF Wipes to chusteczki na bazie etanolu do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych i powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Chusteczki jednorazowe są nasączone roztworem Bactacid AF i dostarczane w wygodnym i gotowym do użycia opakowaniu. Doskonały produkt w warunkach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, gdzie istotna jest szybka i regularna dezynfekcja powierzchni. **Nie zawiera aldehydów, substancji zapachowych i barwników** i nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

Chusteczki Bactacid AF Wipes mają szerokie spektrum działania bakteriobójczego (w tym MRSA, VRE), mykobakteriobójczego (w tym Mycobacterium avium i Mycobacterium terrae), w pełni wirusobójczego (w tym wszystkie wirusy otoczkowe, Rota, Adeno, Noro i Polio), grzybobójcze i drożdżobójcze.

Chusteczki Bactacid AF Wipes zostały przebadane dermatologicznie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji na bazie alkoholu do wyrobów medycznych i innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu, gdzie wymagany jest krótki czas kontaktu, na przykład w następujących obszarach:

- Szpitale i przychodnie
- Sale operacyjne i gabinety zabiegowe
- Oddziały intensywnej terapii
- Oddziały ratunkowe
- Oddziały dializ
- Gabinety lekarzy rodzinnych, punkty pierwszej pomocy
- Karetki pogotowia
- Laboratoria i diagnostyka
- Gabinety dentystyczne
- Do domowej opieki nad pacjentem
- Przemysł spożywczy i obszary przetwórstwa spożywczego
- Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Sposób użycia:

Chusteczki BACTICID AF Wipes są gotowe do użycia. Otwórz pokrywę wiadra i wyciągnij impregnowaną chusteczkę aż do

perforacji. Aby oderwać chusteczkę, pociągnij ją gwałtownym ruchem pod niewielkim kątem. Po oderwaniu chusteczki natychmiast zamknij wieczko, aby uniknąć wysuszenia chusteczek.

Dokładnie przetrzyj powierzchnię zaimpregnowaną chusteczką, zapewniając całkowite krycie. Aby powierzchnia zaczęła działać, musi pozostać widocznie zwilżona przez 30 sekund.

Płukanie powierzchni nie jest wymagane. Oznaczyć datę pierwszego użycia na opakowaniu produktu.

Chusteczki Bactacid AF Wipes to doskonały produkt do szybkiej dezynfekcji powierzchni takich jak powierzchnie w pobliżu pacjenta, stoły operacyjne, leżanki do badań, nosze, fotele pacjenta, wózki inwalidzkie, sprzęt medyczny, tace, wózki, łóżka szpitalne i położnicze.

Jeśli tolerancja powierzchni jest nieznana, najpierw wypróbuj ją na niepozornym obszarze. Ten produkt nie nadaje się do szkła akrylowego, pleksiglasu i lakierów rozpuszczalnych w alkoholu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wysocze łatwopalna ciecz i opary. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Uspokój się. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych lub odpowiednio opakowań i odpadów opakowaniowych

STANDARDY:

EN 13624
EN 13697
EN 13727
EN 14348
EN 14476
EN 14561