

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/chemides-pulver-preparat-do-mycia-i-dezynfekcji-narzedzi-chirurgicznych-instrumentow-medycznych-1kg-p-676.html>



Chemides Pulver preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentów medycznych 1kg

Cena	115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4742124007652
Producent	Chemi-Pharm AS

Opis produktu

CHEMIDES PULVER jest nowoczesnym, wysoce aktywnym preparatem na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentów medycznych termolabilnych i termostabilnych.

Chemides Pulver poprzez zastosowanie innowacyjnej substancji dezynfekującej wykazuje bardzo szerokie spektrum działania w krótkim czasie, jest skuteczny wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów oraz sporów. Charakteryzuje się dużą kompatybilnością materiałową. Preparat zalecany jest do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, bronchoskopów, instrumentów optycznych, sprzętu pomocniczego, laryngoskopów oraz przyrządów laboratoryjnych. Ze względu na niskie stężenie roztworu roboczego i szybki czas działania, środek znajduje zastosowanie w tych obszarach, gdzie niezbędny jest szybki obrót instrumentami chirurgicznymi i sprzętem endoskopowym.

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- Preparat w postaci granulatu, rozpuszcza się całkowicie tworząc przejrzysty, jednorodny roztwór roboczy zgodny z wymaganiami Norm Europejskich,
- preparat posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i dezynfekujące,
- nie zawiera w swoim składzie aldehydów, fenoli oraz toksycznych związków metali ciężkich,
- posiada szeroką kompatybilność materiałową, nie powoduje matowienia optyki,
- zawiera inhibitory korozji, które chronią narzędzia podczas procesu dezynfekcji,
- roztwór roboczy jest bezwonny.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Mycie i dezynfekcja narzędzi i wyrobów przed sterylizacją:

Przygotować roztwór roboczy poprzez dodanie odpowiedniej ilości proszku do wody wodociągowej, wymieszać i odczekać 15 minut. Następnie instrumenty medyczne umieścić w roztworze roboczym preparatu w taki sposób, aby były one całkowicie zanurzone. Pozostawić je na wymagany czas ekspozycji 5 lub 10 minut, jeżeli w trakcie dezynfekcji zostanie dodany

instrument czas należy liczyć od ostatniego dodanego narzędzia. Zdezynfekowane narzędzia należy wyjąć i opłukać pod wodą sterylną lub bieżącą w zależności od dalszego postępowania, jakiegokolwiek pozostałości roztworu usunąć chusteczką płócienną nasączoną alkoholem. Narzędzia lub wyroby przekazać dalszym procesom higienicznym: sterylizacji bądź dezynfekcji wysokiego poziomu.

Dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów i inny wyrobów:

Oczyszczone, umyte i osuszone instrumenty medyczne włożyć do wcześniej przygotowanego 1,5% roztworu Chemides Pulver, zwracając szczególną uwagę, aby były całkowicie zanurzone a wszelkie dreny, tuby i węże wypełnione wewnątrz roztworem roboczym. Zdezynfekowane narzędzia należy wyjąć i opłukać pod wodą sterylną w zależności od dalszego postępowania, jakiegokolwiek pozostałości roztworu usunąć chusteczką płócienną nasączoną alkoholem. Przechowywać według ustalonych procedur.

Mycie i dezynfekcja powierzchni i inkubatorów:

Oczyszczone wstępnie powierzchnie dokładnie pokryć przygotowanym roztworem Chemides Pulver poprzez rozprowadzenie ścierką lub gazą. Odczekać wymagany czas ekspozycji 5 lub 10 minut, następnie spłukać dezynfekowaną powierzchnię wodą. Wszystkie wyroby, które można zanurzyć w roztworze zaleca się dezynfekować w ten sposób.

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Chemides Pulver jest preparatem wykazującym bardzo szeroką kompatybilność materiałową, nie należy go jednak stosować do wyrobów wykonanych z miedzi, cynku, brązu, mosiądzu i powierzchni aluminiowych.

CERTYFIKATY I ATESTY:

Produkt zgodny z założeniami dyrektywy o wyrobach medycznych- 93/42/EEC

Wyrób Medyczny kl.IIa,

Znak CE 0088

Spektrum biobójcze	Czas działania	
	5 min	10 min
Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w placówkach służby zdrowia	1,5%	
Bakterie, grzyby	1,5%	
Prątki	1,5%	
M. Tuberculosis, M.Terrae, M.Avium		
Wirusy		1,5%
BVDV(HCV), HBV, HIV, Adenovirus, Poliovirus		
Spory		1,5%
B. Subtilis, B. Cereus, C. Sporogenes		

Działanie mikrobójcze jest zgodne z następującymi normami:

Działanie bakteriobójcze: EN 14561, AFNOR NF T 72-190

Działanie grzybobójcze: EN 14562, AFNOR NF T 72-190

Działanie prątkobójcze: EN 14563, AFNOR NF T 72-190

Działanie wirusobójcze: EN 14476

Działanie sporobójcze: AFNOR NF T 72-190

SKŁAD CHEMICZNY:

* 100 g preparatu zawiera:

* Nadwęglan sodu - 42 g

* Czteroacetyloetylenodiaminy - 25 g

Waga: 1kg