

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/mission-inrpt-aparat-do-pomiaru-krzepliwosci-krwi-p-1879.html>

MISSION INR/PT aparat do pomiaru krzepliwości krwi

Cena	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	682607611379
Producent	ACON Labs

Opis produktu

MISSION INR/PT aparat do pomiaru krzepliwości krwi

Aparat do badania krzepliwości krwi **MISSION INR/PT** do użytku profesjonalnego i domowego - dający szybki odczyt wskaźników PT/INR uzyskanych z próbek krwi włośniczkowej lub żyłnej. Polecany do diagnostyki domowej i profesjonalnej.

Produkt amerykańskiej firmy ACON Laboratories Inc. mającej ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji rozwiązań diagnostycznych zapewnia najwyższą jakość i dokładność połączoną z najlepszą funkcjonalnością.

Cechy produktu

MISSION INR/PT to aparat do pomiaru krzepliwości krwi, który łączy w sobie dokładność laboratoryjną z łatwością użytkowania. Produkt pochodzi z USA i spełnia normy jakościowe ISO 17593, co gwarantuje dokładność kliniczną pomiarów. Aparat pozwala na szybki odczyt wyników w ciągu zaledwie 2 minut, a do analizy wystarczy mała kropla krwi, zarówno włośniczkowej, jak i żyłnej bez antykoagulantu.

Przeznaczenie

Aparat przeznaczony jest do monitorowania krzepliwości krwi w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych. Dzięki niemu pacjenci mogą na bieżąco kontrolować swoje parametry, co jest szczególnie ważne w terapiach antykoagulacyjnych.

Funkcje

MISSION INR/PT oferuje zakres pomiarowy od 0,7 do 7,0, co pozwala na dokładne monitorowanie różnych stanów krzepliwości krwi. Każdy pasek testowy jest zapakowany w indywidualną kopertkę, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo użytkowania.

Zalety

Do największych zalet produktu zaliczyć można jego dokładność, zarówno laboratoryjną, jak i kliniczną, zgodną z normami ISO. Szybki czas odczytu wyników oraz możliwość użycia małej ilości krwi to kolejne atuty, które ułatwiają codzienne użytkowanie aparatu.

Jak działa

Aparat działa na zasadzie elektrochemicznej, analizując próbkę krwi nałożoną na pasek testowy. Dzięki zaawansowanej technologii, aparat jest w stanie szybko i dokładnie określić poziom INR, co jest kluczowe w monitorowaniu terapii

antykoagulacyjnych.

Sposób użycia

Do przeprowadzenia testu wystarczy nałożyć małą kroplę krwi na pasek testowy, a następnie włożyć go do aparatu. Po 2 minutach na wyświetlaczu pojawi się wynik. Proces jest szybki i prosty, co sprawia, że aparat może być używany zarówno przez profesjonalistów, jak i pacjentów w warunkach domowych.

Kompatybilne paski

Aparat jest kompatybilny z paskami dostępnymi w opakowaniach po 8, 12 oraz 48 sztuk, co pozwala na dopasowanie ilości pasków do indywidualnych potrzeb użytkownika. Potrzebne paski testowe do analizatora krzepliwości krwi Mission INR/PT kupisz w naszym sklepie medbox.pl.

Paski testowe Mission® PT/INR, przy stosowaniu z aparatem Mission® PT/INR, dokładnie i rzetelnie mierzą czas protrombinowy (PT) oraz wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) w próbkach świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca lub świeżej pełnej krwi żyłnej nie zawierającej antykoagulantu. Po włożeniu paska testowego do aparatu próbka krwi jest nanoszona na specjalny obszar zaznaczony na pasku testowym. Aparat wykrywa obecność próbki na pasku i inicjuje upływ czasu testowego. Membrana paska zawiera odczynniki potrzebne do rozpoczęcia reakcji krzepnięcia. Czas od początkowego wykrycia próbki do pojawienia się odpowiedzi na sygnał fluorescencyjny jest wykorzystywany do obliczania czasu protrombinowego oraz wartości INR podanej próbki krwi.

Zawartość Zestawu



Zestaw Mission PT/INR zawiera wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia testów:

- Aparat Mission PT/INR
- Baterie AA - 4 szt.
- Zasilacz

- Instrukcje obsługi aparatu
- Instrukcja używania pasków
- Paszport techniczny
- Futerał

Gwarancja

Na aparat Mission PT/INR przysługuje 24-miesięczna gwarancja, co jest gwarancją jakości i niezawodności produktu.

Dodatkowe akcesoria (nie stanowią części zestawu):

Paski testowe PT/INR - 8 sztuk (opakowanie zawiera 8 pasków w osobnych saszetkach, 1 chip, instrukcje używania pasków)
Paski testowe PT/INR - 12 sztuk (opakowanie zawiera 12 pasków w osobnych saszetkach, 1 chip, instrukcje używania pasków)
Paski testowe PT/INR - 48 sztuk (opakowanie zawiera 48 pasków w osobnych saszetkach, 1 chip, instrukcje używania pasków)
Kapilarki 15 µl - 1 op (2 x 25 szt.)
Jednorazowe nakłuwacze 21G/2,8M - 1 op.(25 szt.)
Zewnętrzna drukarka Mission
Roztwory kontrolne