

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/sterisept-instru-bezaldehydowy-preparat-do-mycia-i-dezynfekcji-narzedzi-medycznych-i-endoskopow-5l-p-564.html>



Sterisept INSTRU bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i endoskopów 5L

Cena	335,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Chemi-Pharm AS

Opis produktu

STERISEPT INSTRU to bezaldehydowy preparat na bazie związków aminowych do dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych.

Cechy produktu:

- nie zawiera fenoli, aldehydów i fosforanów
- szerokie spektrum skuteczności mikrobiologicznej
- dobra kompatybilność materiałowa
- dobre właściwości czyszczące

STERISEPT INSTRU jest przeznaczony do ręcznej dezynfekcji i dezynfekcji wstępnego czyszczenia wszystkich termostabilnych i termolabilnych instrumentów medycznych. **STERISEPT INSTRU** łączy w sobie zarówno czyszczenie, jak i dezynfekcję, dzięki czemu doskonale nadaje się do ręcznej obróbki wstępnej wyrobów medycznych, takich jak instrumenty chirurgiczne i dentystyczne oraz endoskopy sztywne. **STERISEPT INSTRU** ma szerokie spektrum działania bakteriobójczego (w tym MRSA, VRE), mykobakteriobójczego (w tym *Mycobacterium avium* i *Mycobacterium terrae*), grzybobójczego i drożdżobójczego. Produkt działa również na wirusy (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Noro i Rota) oraz zarodniki (w tym *Clostridium difficile*).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Nadaje się do stosowania w szpitalach, laboratoriach, klinikach dentystycznych i innych placówkach medycznych. **STERISEPT INSTRU** nadaje się również do stosowania w kąpielach ultradźwiękowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane dawkowanie: 0,25 - 1% (2,5 - 10 ml na 1000 ml wody) w zależności od wymaganej skuteczności

Dezynfekcja i czyszczenie w kąpeli zanurzeniowej:

STERISEPT INSTRU jest skoncentrowany. Przygotować roztwór roboczy, rozcieńczając żądane stężenie w wodzie (w temperaturze pokojowej). Na przykład rozcieńczyć 5 ml **STERISEPT INSTRU** w 995 ml wodociągowej, aby uzyskać 0,5% roztwór roboczy. Po użyciu natychmiast zdemontuj instrumenty tak bardzo, jak to możliwe i umieść je w roztworze roboczym **STERISEPT INSTRU**. W razie potrzeby wyczyść mechanicznie. Upewnij się, że wszystkie powierzchnie są całkowicie pokryte roztworem, unikając pęcherzyków. Po zalecanej czasie działania dokładnie wypłukać wszystkie instrumenty pod bieżącą wodą o minimalnej jakości wody pitnej.

Charakteryzuje się szerokim spektrum mikrobójczym: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota)- od 15 min. Roztwór roboczy preparatu może być stosowany do 7 dni.

Przystosowany do materiałów np. gumy, tworzyw sztucznych i metali. Posiada w swoim składzie dodatek środków, powodujący, że dezynfekowane narzędzia nie korodują.

Certyfikaty i atesty:

Produkt zgodny z załoženiami dyrektywy o wyrobach medycznych- 93/42/EEC
Wyrób Medyczny kl.IIa,



Znak CE 0088

Opakowanie - kanister 5-litrowy